



PREVENT®

EXCELLENT ORAL CARE

Stain Removal
Re-Whitening 6% H₂O₂
n-HAp Enamel Repair

PREVENT CrWR PROZEDUR

MADE IN THE NETHERLANDS

www.prevent.eu

PrevDent Cleaning, (re)Whitening & Repair IN BILDERN



1
Setzen Sie den Wangenhalter ein und platzieren Sie die Watterollen.



2
Legen Sie den Kofferdamm an und härten Sie ihn aus.



3
Legen Sie die Serviette auf die Lippen und tragen Sie die Masking Cream auf.



4
Decken Sie die Gaze über die Masking Cream.



5
Öffnen Sie den Stain Removal Swab.



6
Tragen Sie die Stain Removal Lösung grosszügig auf bis die Zähne gesättigt sind.

Aktivierung der Re-Whitening Flasche - 6% H2O2 – nHAp Mix-Spender.


7
Drehen Sie den Verschlusskopf auf 1 und pumpen Sie bis die Flüssigkeit austritt.

8
Drehen Sie den Verschlusskopf auf 2 und pumpen Sie bis die Flüssigkeit austritt.

9
Drehen Sie den Verschlusskopf zurück zur roten H2O2 Markierung.



10
Pumpen Sie 6-8 mal in die schwarze Misch-Schale.

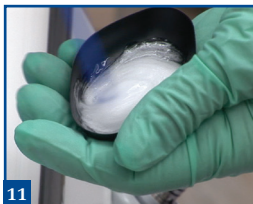

11
Mischen Sie die Flüssigkeit schnell für etwa 10-15 Sekunden bis ein dicker Schaum entsteht.



12
Tragen Sie den Schaum 5 mm dick auf die Zähne auf.



Nutzung Lampe ist optional

13
Schaum für 10 Min wirken lassen. Dann absaugen. Schritte "6 - 12" 6 x wiederholen.



14
Repairing Serum öffnen und die Ampulle drücken bis der Schwamm durchnässt ist.



15
Die Zähne mit dem Repairing Serum benetzen. Lassen Sie ihn für mind. 3 Min. einwirken.

Kontrollieren Sie die Ausgangs- und Endfarbe



Anordnung des Vita® Classic Shade Guide.

*Vita is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & KG.